

EEN BEHANDELING ZONDER BUIKOPERATIE VOOR ABNORMALE BAARMOEDERBLOEDINGEN VEROORZAAKT DOOR POLIEPEN EN VLEESBOMEN

Meer informatie over het
TruClear™-systeem



Medtronic
Further. Together

VIND HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

- Wat zijn abnormale baarmoederbloedingen?
- Wat is een hysteroscopie?
- Wat is de ingreep met het TruClear™-systeem?
- Wat gebeurt er **vóór** uw ingreep met het TruClear™-systeem?
- Wat gebeurt er **tijdens** uw ingreep met het TruClear™-systeem?
- Wat gebeurt er **na** uw ingreep met het TruClear™-systeem?

Een ingreep met het TruClear™-systeem kan uw symptomen aanzienlijk verbeteren.

Met het TruClear™-systeem kan uw arts abnormaal baarmoederweefsel verwijderen zonder buikoperatie en zonder gebruik van elektrische instrumenten in uw baarmoeder. Dit betekent dat het risico op littekenvorming in uw baarmoederslijmvlies lager is en dat u een grotere kans heeft dat u uw baarmoeder in de toekomst kunt behouden.

Artsen gebruiken het TruClear™-systeem voor een aantal ingrepen, waaronder de verwijdering van:

- poliepen of vleesbomen die abnormale baarmoederbloedingen kunnen veroorzaken;
- weefselmonsters bij een biopsie.

De ingreep met het TruClear™-systeem is een minder-ingrijpende behandelingsoptie die poliklinisch wordt uitgevoerd in het ziekenhuis.

Bespreek uw klachten met uw arts en vraag naar wat u kunt verwachten van de behandeling. Vraag uw arts – net als bij elke ingreep – om meer informatie over de mogelijke risico's van deze behandeling en of deze geschikt voor u is.



Wat zijn abnormale baarmoederbloedingen?

Abnormale baarmoederbloedingen kunnen bestaan uit langdurige, onregelmatige of zelfs postmenopauzale bloedingen. Als u één van de 10 miljoen vrouwen bent die aan abnormale baarmoederbloedingen lijdt,¹ kan dit te wijten zijn aan poliepen of vleesbomen.

Wat zijn poliepen en vleesbomen?

Endometriumpoliepen ontstaan uit het slijmvlies van de baarmoeder, het zogenaamde endometrium. Deze poliepen veroorzaken onregelmatige doorbraakbloedingen en pre- of postmenstrueel bloedverlies. De mate waarin poliepen voorkomen, neemt toe met de leeftijd, maar ze kunnen ook op jongere leeftijd ontstaan en soms invloed hebben op de vruchtbaarheid. Kwaadaardige poliepen komen niet vaak voor, maar het risico stijgt met de toenemende leeftijd en bij postmenopauzale bloedingen. Daarom adviseren artsen deze poliepen die klachten veroorzaken, te verwijderen en ze te testen.²

Vleesbomen in de baarmoeder brengen doorgaans geen verhoogd risico op baarmoederkanker met zich mee, en ze ontwikkelen zich zelden tot kanker. Maar ze kunnen wel rug- en bekkenpijn veroorzaken, en ook zware, langdurige en/of veelvuldige bloedingen.³ Vleesbomen zijn een veelvoorkomend gezondheidsprobleem bij:⁴


- 20% van de vrouwen die kinderen kunnen krijgen;
- 70%-80% van de vrouwen jonger dan 50 jaar.

Vleesbomen die onder het slijmvlies ontstaan (submucosale vleesbomen), groeien en puilen uit in de richting van het binnenste van de baarmoeder. Ze worden meestal verwijderd omdat er een verband is aangetoond met de volgende negatieve effecten op de vruchtbaarheid:⁵

- Kans op zwangerschap verminderd met 64%;
- Kans op een levend geboren baby verminderd met 69%;
- Kans op een miskraam vergroot met 67%.

Behandelingsopties

Behandelingen voor abnormale baarmoederbloedingen variëren van hormoontherapie tot volledige verwijdering van de baarmoeder (hysterectomie). De ingreep met het TruClear™-systeem is een minder-ingrijpende optie voor de veilige verwijdering van endometriumpoliepen en submucosale vleesbomen.

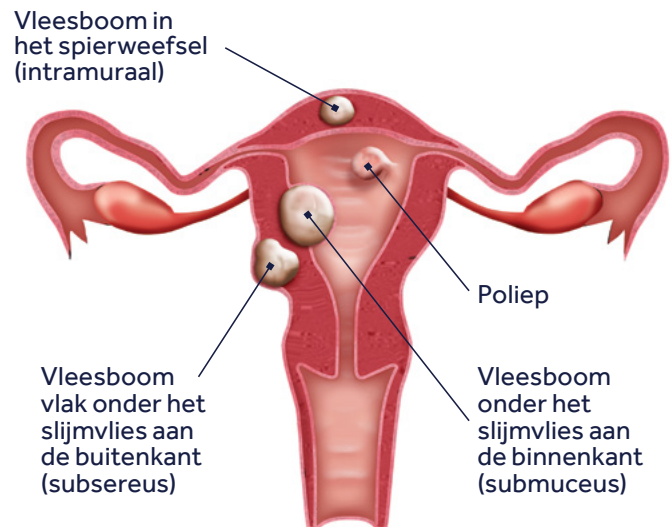

Wat is een hysteroscopie?

Bij een onderzoek van de baarmoeder (hysteroscopie) gebruikt uw arts een kijkbuis met een camera - dit heet een hysteroscoop - om uw baarmoeder te onderzoeken. Als er poliepen of vleesbomen worden aangetroffen in het weefsel, kunnen deze meteen mee worden verwijderd.



Wat houdt de ingreep met het TruClear™-systeem in?

De ingreep met het TruClear™-systeem biedt een minder-ingrijpende behandelingsoptie voor vrouwen die lijden aan baarmoederbloedingen veroorzaakt door afwijkingen zoals poliepen en vleesbomen.

Met het TruClear™-systeem kan uw arts abnormaal baarmoederweefsel verwijderen zonder buikoperatie. De ingreep wordt doorgaans poliklinisch in het ziekenhuis uitgevoerd. Via uw baarmoederhals wordt een kijkbuis ingebracht, zodat uw arts in uw baarmoeder kan kijken. Nadat afwijkend weefsel is vastgesteld, brengt uw arts via de kijkbuis een klein instrument in waarmee hij het baarmoederweefsel snel verwijderd. Het speciale ontwerp van de instrumenten van het TruClear™-systeem zorgt er ook voor dat het baarmoederslijmvlies zo min mogelijk beschadigd wordt en u uw baarmoeder kunt behouden.

In tegenstelling tot veel andere behandelingen worden bij de ingreep met het TruClear™-systeem geen elektrische instrumenten in uw baarmoeder gebruikt. Dit betekent dat er geen risico is op brandwonden door elektriciteit in het baarmoederslijmvlies. Bovendien verloopt deze ingreep meestal sneller dan de elektrische optie.⁶

Lees wat u kunt verwachten voor, tijdens en na uw ingreep met het TruClear™-systeem.

Wat gebeurt er vóór uw ingreep met het TruClear™-systeem?

Van uw arts krijgt u instructies over hoe u zich op de ingreep kunt voorbereiden. Hoewel het voor elke patiënt anders kan verlopen, kunt u doorgaans het volgende verwachten:

- Uw arts kan uw medische voorgeschiedenis grondig bekijken. U kunt worden gevraagd of u andere aandoeningen heeft, zoals diabetes en/of een hartziekte.
- Uw arts kan bloedonderzoek laten doen om te testen op bijvoorbeeld zwangerschap en/of infectie.
- Vermijd geslachtsgemeenschap, vaginale crèmes, geneesmiddelen en vaginale douches gedurende enkele dagen vóór uw ingreep.
- Uw arts kan u adviseren om een uur vóór de ingreep een vrij verkrijgbare pijnstiller in te nemen om mogelijke kramp na de operatie te helpen verlichten.
- Uw arts kan u vooraf een geneesmiddel toedienen om de ingreep gemakkelijker uit te kunnen voeren. Uw arts bepaalt dit en het kan per patiënt verschillen.
- Als er verdoving wordt gebruikt, kan het zijn dat u wordt verteld om niets meer te eten of te drinken na middernacht in de nacht vóór uw ingreep.




Op de dag van uw ingreep

De ingreep met het TruClear™-systeem vindt plaats in de polikliniek van het ziekenhuis. Op de dag van de ingreep kan het volgende plaatsvinden:

- Uw arts zal de ingreep met het TruClear™-systeem en eventuele onderzoeksuitslagen met u bespreken.
- Uw vitale functies, zoals bloeddruk en temperatuur, worden mogelijk gemeten.
- U krijgt mogelijk een infuus met vocht en medicatie tijdens en na uw ingreep.
- Als een verdoving noodzakelijk is, bespreekt de anesthesioloog of anesthesist de soort verdoving die u zult krijgen.

Wat gebeurt er tijdens uw ingreep met het TruClear™-systeem?

1. Uw arts brengt de kijkbuis met camera (hysteroscoop) via de vagina en de baarmoederhals in de baarmoederholte. De hysteroscoop bevat een lampje en een camera waarmee uw arts in uw baarmoeder kan kijken.
2. Via een klein buisje in de hysteroscoop vloeit een zoutoplossing naar binnen, die uw baarmoederholte opent zodat uw arts beter zicht heeft en een betere toegang heeft tot het weefsel dat wordt verwijderd.
3. Een speciaal ontworpen instrument wordt ingebracht in de hysteroscoop om met behulp van een roterend mesje het ongewenste weefsel te verwijderen.
4. Na verwijdering van het weefsel verwijdert uw arts de instrumenten en is de ingreep klaar. Hoewel de hersteltijd per geval verschilt, kunnen de meeste patiënten binnen enkele uren naar huis en de volgende dag hun normale bezigheden weer oppakken.

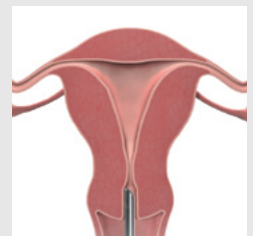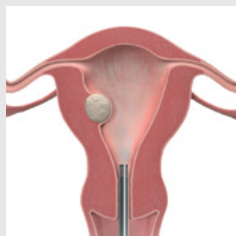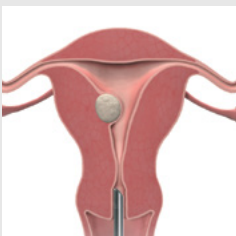




Wat gebeurt er na uw ingreep met het TruClear™-systeem?

Uw arts zal u specifieke informatie geven over de zorg na uw ingreep. Er kan onder andere het volgende optreden na uw behandeling:

- U kunt last krijgen van bloedingen en menstruatieachtige krampen. Als dat zo is, kan uw arts u adviseren maandverband te gebruiken in plaats van tampons.
- U mag gedurende een bepaalde tijd na de behandeling geen vaginale douche of vaginale geneesmiddelen gebruiken. Uw arts zal aangeven hoe lang dit niet mag.
- U mag gedurende een bepaalde tijd na de behandeling geen geslachtsgemeenschap hebben. Uw arts bepaalt hoe lang deze periode voor u duurt.
- Uw arts plant waarschijnlijk enkele dagen na uw behandeling een vervolgspraak in om de resultaten met u te bespreken.
- Hoewel het onwaarschijnlijk is, heeft u mogelijk een aanvullende behandeling nodig, afhankelijk van de eerste resultaten van uw behandeling. Uw arts zal dit met u bespreken.

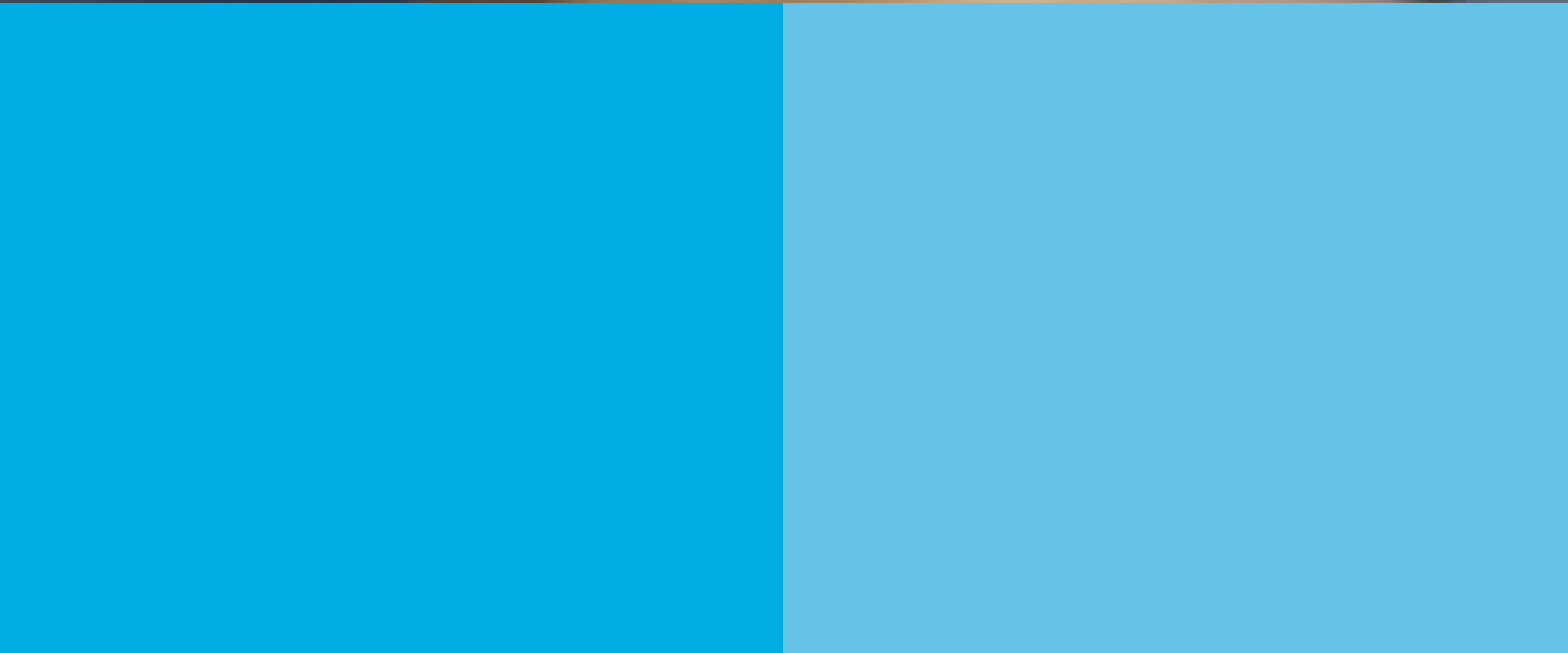

HET VOORDEEL VAN HET TRUCLEAR™-SYSTEEM

Het TruClear™-systeem biedt een minder-ingrijpende optie voor de behandeling van afwijkingen in de baarmoederholte. De voordelen zijn onder meer:

- een ingreep zonder buikoperatie;
- geen gebruik van elektrische instrumenten in uw baarmoeder;
- minimale hersteltijd;⁷
- zo minimaal mogelijk risico op beschadiging van de baarmoeder en behoud van baarmoederslijmvlies.

Belangrijke opmerkingen

De ingreep met het TruClear™-systeem is bedoeld om weefsel in de baarmoeder te verwijderen; dit weefsel kan abnormale baarmoederbloedingen of onvruchtbaarheid veroorzaken. Net als bij elke ingreep, zijn ook aan deze ingreep mogelijke risico's verbonden, zoals te grote vochttoediening en perforatie van de baarmoeder. Vrouwen die zwanger zijn, een bekkenontsteking hebben of van wie bekend is dat ze endometriumkanker hebben, mogen deze ingreep niet ondergaan. Bespreek met uw arts of u in aanmerking komt voor de ingreep met het TruClear™-systeem.

De informatie in deze brochure is een algemene leidraad en is niet bedoeld als medisch advies. Elke patiënt is uniek en dient de specifieke instructies van haar arts volgen. Bespreek de geneesmiddel- en behandelingsopties met uw arts om ervoor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt voor uw specifieke situatie.

Referenties

1. Curtis, M, Linares, S, Antoniewicz, L. *Glass' Office Gynecology*. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2014:176.
2. American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL). AAGL practice report: practice guidelines for the diagnosis and management of endometrial polyps. *J Minim Invasive Gynecol*. 2012;19(1):3-10.
3. Uterine fibroids. Office of Women's Health Website. <https://www.womenshealth.gov/a-z-topics/uterine-fibroids>. Updated Feb. 6, 2017. Ingezien op 25 juli 2017.
4. Hickman D, Selby JV. Treatment options for uterine fibroids. Patient-Centered Outcomes Research Institute. Maart 2013.
5. Kovacs P, M.D., Ph.D. Effects of fibroids on women's fertility. Medscape website. <http://www.medscape.com/viewarticle/701937>. Gepubliceerd op 29 april 2009. Ingezien op 31 januari 2017.
6. Emanuel M, Wamsteker K. The Intra Uterine Morcellator: A New Hysteroscopic Operating Technique to Remove Intrauterine Polyps and Myomas. *J Minim Invasive Gynecol*. 2005; 12(1), 62-66.
7. Emanuel M. New Developments in Hysteroscopy. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2013; 27, 421-429.

Photo credit: iStock

Medtronic

Medtronic Trading NL B.V.

Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
Tel: +31 (0)40 711 75 55
Fax: +31 (0)40 711 75 22

BELANGRIJK: Gelieve te verwijzen naar de handleiding voor volledige instructies, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.

© 2019 Medtronic. Alle rechten voorbehouden. Medtronic, het logo van Medtronic en Further, Together zijn samen handelsmerken van Medtronic. TM* Handelsmerken van derden gemarkeerd met TM zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Alle andere merken zijn handelsmerken van een Medtronic-onderneming. 17-weu-truclear-patient-brochure-nl-1535975

medtronic.com/covidien/en-gb/index.html