


Instructie ooguitstrijk


HMC diagnostiek




Open de verpakking. Neem het wattenstokje en het buisje eruit.

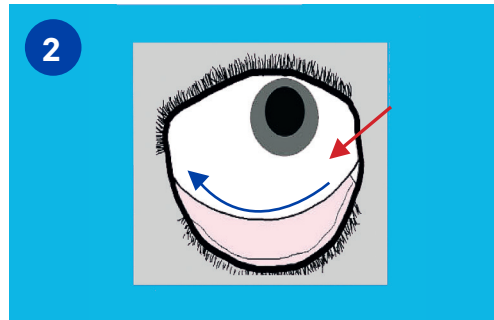


Desinfecteer de handen en draag handschoenen tijdens het afnemen. Trek voorzichtig het onderste ooglid naar beneden en strijk van binnen naar buiten over de conjunctiva (overgang tussen oog en ooglid).

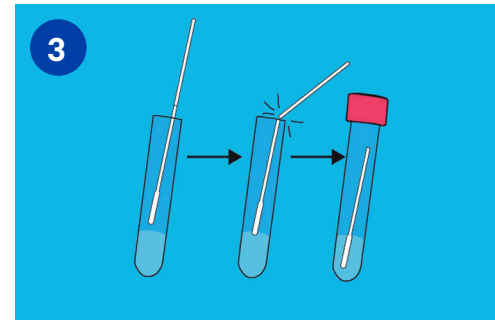


Open de buis en doe het wattenstokje erin. Breek de wattenstok af op het gekeurde afbreekpunt. Draai de dop stevig vast.

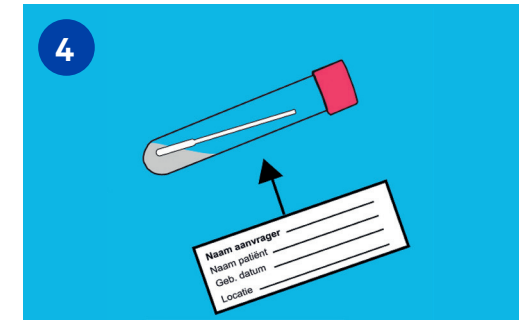


Vul de patiëntgegevens in op het etiket. Plak de sticker in de lengterichting op het buisje.

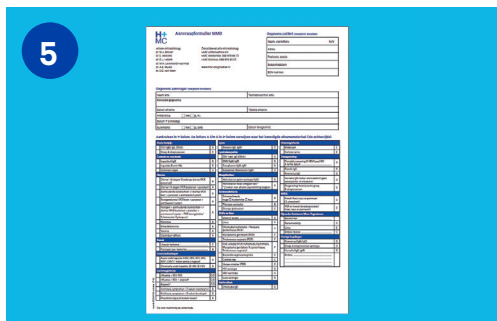


Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

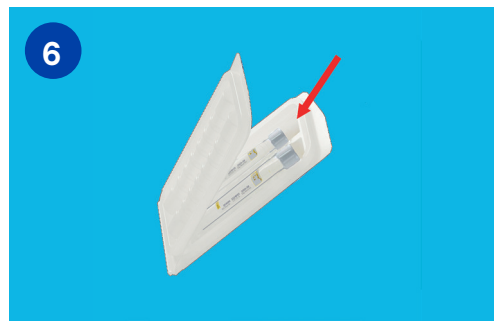

Stop de afnamebuis met een absorptievel in de blister.

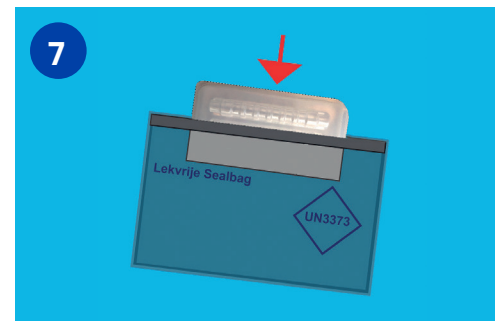

Stop de blister in de doorzichtige safetybag (plastic zakje). Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak hem dicht.

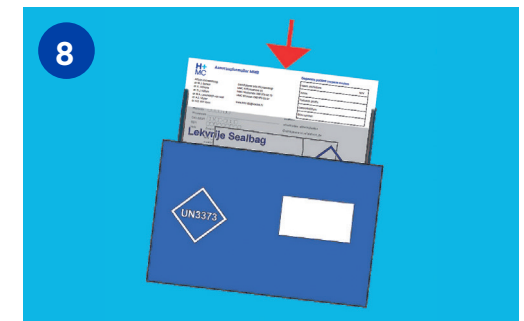

Doe de safetybag en het aanvraagformulier in de verzendenvolp. Uw huisarts geeft de informatie over het inleveren bij een afgiftepunt of verzenden per post.